



Producent: Hunan Biomaser Technology Co.,LTD.
ADShi Electronic Equipment Co.,LTD.
Add.: Room 805, Building 3B, Xingsha International
Business Center, No.68 LuoSitang Road,
Changsha, Hunan, China

Importer: TRADERON Sp. z o.o.
ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa, Polska
VAT: PL9512498344

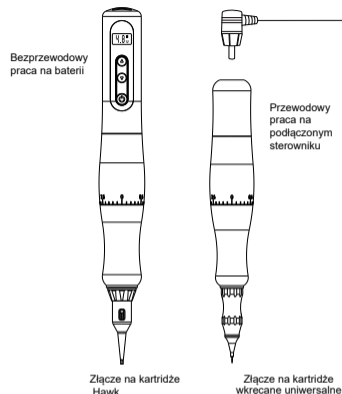

Oba złącza pracują zamiennie

BIOMASER S1

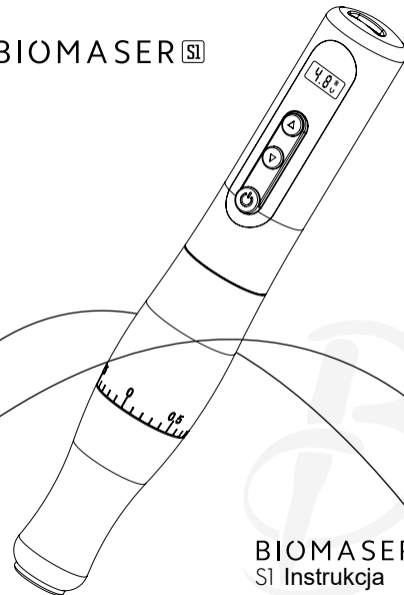

Model: S1

Zasilanie: 5V

Moc: 10w

Skok: 3mm

Materiał: aluminum/mat

Bateria: 900MAh

Czas ładowania: 2-3 godz.

USB: 5V zasilacz


Czas pracy: 4-5 godz.

Pen+bateria waga: 112g

Waga baterii: 40g

Rozmiar: 22*146mm


Złącze ładowania: Type-C

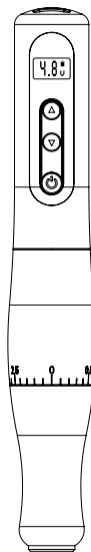



Krok 1
Zamocować kartridż.

Krok 3
Kręć grip'em aby ustawić wysuw igły.

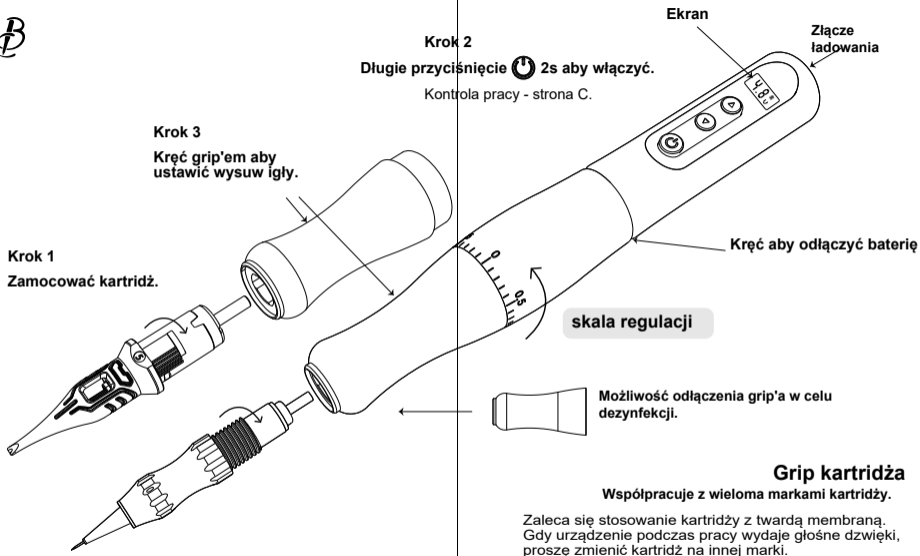

A


B

Krok 2
Długie przyciśnięcie 2s aby włączyć.
Kontrola pracy - strona C.

Grip kartridża

Współpracuje z wieloma markami kartridży.

Zaleca się stosowanie kartridży z twardą membraną. Gdy urządzenie podczas pracy wydaje głośne dźwięki, proszę zmienić kartridż na innej marki.

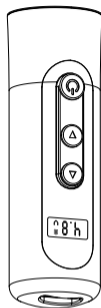

▲ Charging port



Bateria zasilająca

Ekran	Woltaż	Wskaźnik baterii
	4.8V	

Przycisk: stop&start

Długie przytrzymanie ok 2sek w celu włączenia. Poziom mocy na starcie 7v.

Stop&start : jedno kliknięcie

Tryb zawieszenia :

Gdy urządzenie jest spalzone, woltaż jest wyświetlany jako 0.0 - powróci do normalnego po wznowieniu pracy.

"+" wyższa moc

"-" mniejsza moc

"+" "-", zmiana woltażu co 0.1v

Niski poziom baterii , proszę naładować

Napięcie ładowania: DC5V+0.2

Czas ładowania: 2-3 godz.

Po teście rozładowania:

9 V może wytrzymać 1,6 godziny pracy,

5 V może wytrzymać 3 godziny pracy

C



Ochrona baterii

Akumulator posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe. W przypadku zwarcia akumulatora (natychmiastowe wyłączenie zasilania). Użyj ładowarki, aby włączyć akumulator i ponownie go aktywować.

Czyszczenie powierzchni

W przypadku zewnętrznych zanieczyszczeń: Rozebrać chwyt i napęd przetrzeć chwyt i napęd szczególnie tłok i długą tuleję ochronną miękką szmatką zwilżoną środkiem czyszczącym lub dezynfekcyjnym. Oczyścić niedostępne powierzchnie, np. gwint zespołu chwytно- napędowego za pomocą nylonowej szczoteczki z miękkim włosiem lub wacika.


Uwaga

Sekcja baterii i sekcja napędu nie obsługują dezynfekcji środowiska w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności.

O-ring konserwacja

Gdy kartridż się obraca, jest suchy i niegladki. Nałóż kroplę smaru na O-ring.

Jeśli nie ma profesjonalnego smaru, można zamiast niego zastosować olej roślinny. Jeśli O-ring jest uszkodzony, wymień go na czas.

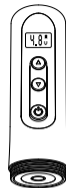

moduł baterii



moduł silnika



grip kartridża

D